



Numéro d'article	170078
Prix HT	16,84 €
Prix TTC	20,38 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

L'Accu-Chek® FastClix est le premier piqueur au monde à permettre un prélèvement de sang avec un seul clic. Désormais, armer et piquer ne vous demanderont qu'un seul clic! Le stylo autopiqueur Accu-Chek FastClix est le premier stylo autopiqueur doté d'un système de clic et d'un porte-lancette. Cette technologie unique garantit un prélèvement rapide, facile et pratiquement indolore. L'embout rotatif dispose de 11 réglages de profondeur qui vous permettent d'adapter l'appareil à votre type de peau. Le stylo autopiqueur est doté d'un support avec six lancettes pré-remplies, ce qui vous évite de manipuler les lancettes séparément.

AVANTAGES ET CARACTÉRISTIQUES

- Prélèvement rapide et facile en un seul clic
- Glissière de chargement pour faciliter la sélection d'une nouvelle lancette
- Capuchon rotatif avec onze réglages de profondeur pour différents types de peau

- Le porte-lancette est préchargé avec six lancettes, de sorte que vous n'avez pas à toucher aux aiguilles.
- La fenêtre située à côté du curseur de chargement indique le nombre de lancettes restantes dans le porte-lancette.
- Aucun conteneur d'aiguilles n'est nécessaire
- Moins de risques de blessures accidentelles par piqûre d'aiguille
- La technologie Clixmotion contrôle le mouvement de la lancette avec un minimum de vibrations et de torsions pour une piqûre confortable.
- Pointe effilée à trois niveaux de coupe avec angles optimaux, lancettes de 30G (0,3 mm)
- Fonction AST (sites de prélèvement alternatifs) disponible sur demande

COMMENT UTILISER LE STYLO AUTOPIQUEUR ACCU-CHEK FASTCLIX ?

Le stylo autopiqueur Accu-Chek FastClix vous permet de serrer et de piquer à l'aide d'un seul et même bouton. Avant de prélever du sang, lavez-vous les mains à l'eau chaude savonneuse et séchez-les bien. Insertion du porte-lancette Retirez l'embout du stylo autopiqueur Glissez le nouveau porte-lancette dans le stylo autopiqueur. Remettez l'embout du stylo autopiqueur en place. Réglage de la profondeur de piqûre La profondeur de piqûre de la lancette peut être réglée sur 11 positions (de 0,5 à 5,5). La ligne argentée (repère de profondeur de piqûre) de l'autopiqueur indique la profondeur de piqûre réglée. Prélèvement d'une goutte de sang Appuyez à fond sur le bouton de prélèvement et relâchez-le. Préparation d'une nouvelle lancette Déplacez le petit levier situé sur le côté du stylo autopiqueur aussi loin que possible vers la gauche, puis vers la droite. La lancette suivante est maintenant prête à être utilisée. La fenêtre d'affichage située à côté du levier indique le nombre de lancettes encore disponibles.