



<b>Numéro d'article</b>	170084
<b>Prix HT</b>	16,84 €
<b>Prix TTC</b>	20,38 €
<b>Stock</b>	Plus que 3 en stock

## Description

Les lancettes Accu-Chek<sup>®</sup> Softclix II sont utilisées avec le stylo autopiqueur Accu-Chek<sup>®</sup> Softclix. Les lancettes ont une couche de silicone qui facilite la pénétration dans la peau. Le broyage spécial à 3 méplats garantit la disponibilité d'une quantité suffisante de sang pour mesurer votre glycémie. L'Accu-Chek<sup>®</sup> Softclix est réglable jusqu'à 11 profondeurs de piqûre et comporte des lancettes spéciales avec une couche de silicone souple.

**Accu-Chek<sup>®</sup> Softclix fournit une goutte de sang sans douleur violente.**

- Confort personnalisé. Avec le cadran de confort contenant 11 profondeurs de pénétration vous pouvez adapter la lancette au type de votre peau et obtenir une quantité suffisante de sang pour effectuer une mesure glycémique exacte.
- Technologie Clixmotion brevetée. Clixmotion est le principe du mouvement orienté en double sens, signifiant que le mouvement aller et retour est contrôlé précisément sans vibrations ou oscillations. Ce mouvement spécial est le principe

du prélèvement doux de sang.

- Lancettes précisément fabriquées. Les lancettes Accu-Chek® conçues spécialement sont le résultat fructueux d'une recherche détaillée et exhaustive. L'entaille spéciale de la lancette, ainsi que sa surface homogène et polie implique une pénétration douce et sans douleur.

## COMMENT DOIS-JE UTILISER LE STYLO AUTOPIQUEUR ACCU-CHEK SOFTCLIX?

Le stylo autopiqueur Accu-Chek Softclicx est petit et facile à utiliser.

- Retirez l'embout. Insérez une nouvelle lancette dans le porte-lancette et appuyez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Remettez l'embout en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Tournez le capuchon jusqu'à ce que la profondeur de piqûre souhaitée soit atteinte.
- Appuyez sur le bouton de serrage jusqu'à ce qu'il s'enclenche.
- Appuyez fermement le stylo autopiqueur sur le côté du bout du doigt.
- Appuyez sur le bouton jaune de déverrouillage.
- Après avoir mesuré votre glycémie, retirez l'embout et faites glisser l'éjecteur vers l'avant pour retirer la lancette.