

Numéro d'article	175002
Prix HT	5,58 €
Prix TTC	6,75 €
Stock	en stock

Description

Le test Fluorecare Combo donne 4 résultats en un seul test: SRAS-CoV-2 Influenza A Influenza B VRS Les différents symptômes sont difficiles à distinguer entre ceux du Covid-19, Influenza A/B ou du VRS. Par conséquent, les tests sont importants pour établir un diagnostic et déterminer le traitement approprié. Ce test combiné permet de gagner un temps précieux tout en facilitant le diagnostic. Le test porte le label de qualité CE2934 pour l'autodiagnostic.

Contenu d'un kit de test

- Cassette de test - Ecouvillon nasal court - Tube de liquide tampon - Manuel en 4 langues (NL, DE, FR, ENG)

Le mode d'emploi

- Désinfectez vos mains avant de l'utiliser. - Lisez attentivement le mode d'emploi. - Effectuez le test à température ambiante (20-25°C). 1. Tournez le bouchon du tube d'extraction d'échantillon et retirez le bouchon bleu intérieur. 2. Placez le tube dans la boîte (croix perforée) de manière à ce qu'il reste bien droit. 3. Ouvrez l'emballage scellé et retirez la cassette de test. 4. Retirez l'écouvillon nasal court de son emballage et insérez-le à environ 2,5 cm dans votre narine gauche. 5. Faites tourner la baguette 5 fois pour assurer un échantillonnage adéquat. 6. Répétez ce processus dans la narine droite. 7. Placez l'écouvillon nasal dans le tube à essai et cassez la baguette au niveau de la ligne de rupture, tournez le bouchon du tube et pressez le tube d'échantillon 10 fois. Attendez 1 minute que le liquide fasse effet. 8. Dévissez la partie supérieure du capuchon pour

révéler le nez de la gouttelette. 9. Placer 2 gouttes dans chaque compartiment d'échantillon (S). Attendez que le test s'écoule, insérez du liquide supplémentaire si nécessaire si la bandelette ne s'écoule pas. 10. Attendez 15 minutes et lisez le résultat.