



Numéro d'article	313966
Prix HT	73,94 €
Prix TTC	89,47 €
Stock	Plus que 5 en stock

Description

Le Veroval Duo Control, tensiomètre avec technologie de capteur Duo. Veroval[®] Duo Control mesure la tension artérielle avec la précision de la mesure manuelle chez le médecin et avec la simplicité d'un appareil numérique. Détecte les arythmies. Le tensiomètre Veroval Duo Control est un tensiomètre automesure entièrement automatique qui combine deux méthodes de mesure professionnelles: la technique oscillométrique et la méthode Korotkoff. Une mémoire pour deux fois 100 lectures permet une utilisation personnelle par deux patients et le calcul de la moyenne des lectures pour chaque utilisateur. Ce produit a une garantie de cinq ans. Circonférence du brassard du tensiomètre Veroval[®] Duo Control

- Moyen = 22 - 32 cm.
- Grand = 32 - 42 cm

Avantages du tensiomètre Veroval Duo Control

- Le tensiomètre Veroval[®] Duo Control possède une mesure fiable de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque.
- Le tensiomètre Veroval[®] Duo Control détecte et affiche à l'écran un trouble du rythme cardiaque.
- Le tensiomètre Veroval[®] Duo Control est facile à utiliser. Vous pouvez mesurer votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque en appuyant simplement sur un bouton.
- Le tensiomètre Veroval[®] Duo Control a la même précision que votre médecin.

Application Moniteur de tension artérielle Veroval Duo Control

Le tensiomètre Veroval Duo Control est particulièrement adapté aux personnes souffrant d'hypertension artérielle et de diverses formes d'arythmie cardiaque.

Mode d'emploi :

1. Reposez-vous environ 5 minutes.
2. Placez l'appareil sur une table, asseyez-vous confortablement, exposez votre bras.
3. Placez votre bras sur la table. Votre bras est situé au niveau du cœur (surtout au niveau de la poitrine).
4. Placez le brassard à la bonne hauteur (2,5 cm au-dessus du pli de bras) dans le sens indiqué (câble à la main) sur le bras supérieur.
5. Commencez à mesurer - ne bougez pas, ne parlez pas, restez détendu (ne faites pas un poing).
6. Répétez la mesure 2 à 3 fois de suite avec des intervalles de 1 minute. Mesurez toujours votre tension artérielle en même temps.

Le Veroval Duo Control a une grande mémoire : 2 x 100 valeurs et mode invité. Enregistrement des valeurs matin et soir. Calcul de la moyenne sur 7 jours, selon les directives ESH.

Sécuritaire sur le plan médical et cliniquement validé

- Validations cliniques : Directives EHS, BHS, AAMI, EN 1060-4, ISO 81060-2, certification DHL (German Hypertension League)
- Recommandé pour l'hypertension artérielle et la dysrythmie cardiaque