



Numéro d'article	010410
Prix HT	9,57 €
Prix TTC	11,58 €
Stock	en stock

Description

Les lingettes Skin-Prep forment sur une peau non lésée un film protecteur pour les sites de drainage, de cathétérisme et de pansement. Ce film protecteur est également utilisé autour des stomies.

Caractéristiques & Avantages

- Skin-Prep facilite et prolonge l'adhérence des sparadraps et pansements. Une seule couche suffit.
- Skin-Prep dépose un film préparant la peau à recevoir des adhésifs et lui fournit une interface protectrice.
- Skin-Prep aide à préserver l'intégrité cutanée et empêche la survenue de lésions cutanées mécaniques dues aux adhésifs des sparadraps ou des pansements

- Par sa formule non sensibilisante, Skin-Prep améliore la tolérance et protège contre les irritations ou allergies.
- Skin-Prep diminue la douleur due au retrait des adhésifs chez les patients.
- Skin-Prep s'enlève facilement à l'aide de démaquillant ou d'eau savonneuse. Il n'est donc pas nécessaire de frotter la peau ou de l'exposer à un détergent chimique irritant.
- Sa consistance épaisse explique qu'une seule couche suffise pour former un film protecteur.
- Skin-Prep s'applique facilement, même sur les zones difficiles comme les coudes, les genoux et les talons. Il reste souple sans craquer ni peler lors des mouvements du patient.

Barrière locale efficace entre la peau et les adhésifs ou frottements.

Mode d'emploi

- Nettoyer et sécher la peau avant d'appliquer Skin-Prep.
- Appliquer une couche uniforme sur toute la surface à protéger. Si vous avez sauté un peu, vous pouvez encore l'appliquer après le séchage de la première couche (après environ 30 secondes). Éviter le contact avec les plaies ouvertes.
- Lors de l'utilisation sur des plis cutanés, la peau doit être tenue éloignée l'une de l'autre jusqu'à ce que le liquide soit complètement sec. Pour une protection maximale, une deuxième couche de Skin-Prep peut être appliquée. Lorsque cette couche est complètement sèche, vous pouvez appliquer un tampon adhésif.
- Lors du retrait des bandages auto-adhésifs, le Skin-Prep peut également être retiré. Par conséquent, appliquer de nouveau Skin-Prep après chaque changement de pansement.
- Il n'est pas nécessaire d'enlever Skin-Prep avant de l'appliquer à nouveau. Nettoyer et sécher la peau et appliquer Skin-Prep comme décrit ci-dessus.

Afbeeldingen

