

Numéro d'article	095004
Prix HT	228,79 €
Prix TTC	276,84 €
Stock	en stock

Description

La colle cutanée Dermabond permet une fermeture de plaie rapide et indolore. Le Dermabond est la colle cutanée la plus puissante du marché. Cette colle cutanée offre une solution solide, souple et sans aiguille. Le Dermabond fonctionne aussi bien que les sutures. Comme il n'y a pas de points d'adhérence, il n'y a pas de risque de décoloration ou de cicatrice.

Avantages du Dermabond:


- Une application simple et précise
- Pas de pansements nécessaires
- Un film souple qui s'adapte aux mouvements de la peau
- Protection contre les infections

- Résistance à la douche
- Excellent résultat cosmétique
- Durable à température ambiante : peut être conservé dans le sac du médecin

DermaBond MINI:

- Pour les blessures de moins de 4 cm de long
- Économie de coûts
- Jusqu'à 3 couches nécessaires
- 12 ampoules de 0,36 ml par emballage

Afbeeldingen

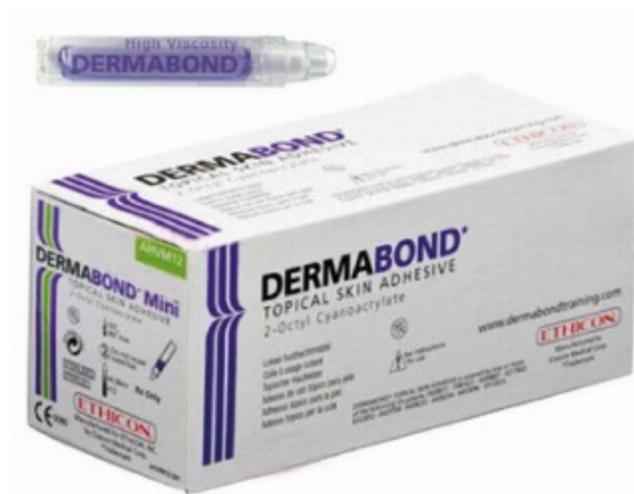

DERMABOND

WONDVOORBEREIDING

- Reinig de wond
- Breng haemostase tot stand
- Droog de wondranden
- Plaats wond (indien mogelijk) horizontaal

APPLICATIE DERMABOND

- Neem ampul uit de verpakking
- Houd tip omhoog
- Knijp glazen binnenampul stuk tussen duim en wijsvinger
- Druk vloeistof zachtjes pompend door de tip, totdat tip geheel paars is
- Houd wondranden bij elkaar
- Breng DERMABOND direct aan
- Strijk DERMABOND over wondranden, > 1cm brede laag
- Vermijd dat DERMABOND in de wond komt, dit kan de wond genezing vertraagden
- Vermijd dat DERMABOND in een oog loopt, positioneer patiënt zodanig dat weglappende lijn van oog af loopt en houdt het oog dicht met een gaas
- Breng met \pm 30 seconden tussentijd nog 1 laag aan
- Bij gebruik van lage viscositeit DERMABOND wordt aangeraden 3 lagen en bij gebruik van hoge viscositeit DERMABOND 2 lagen aan te brengen
- Houd wondranden bijeen tot DERMABOND is uitgehard (\pm 30 seconden na aanbrengen van tweede laag)

VERDERE AANWIJZINGEN

- Gebruik geen zalf of andere geneesmiddelen op DERMABOND
- Droog verband aanbrengen mag, maar is niet nodig
- Breng geen huidstrips op DERMABOND aan
- Niet aan DERMABOND peuteren
- DERMABOND valt vanzelf van huid af na 5 tot 10 dagen
- Douchen en wassen is toegestaan, baden en zwemmen niet