



Evercare Comfort IV plâtre transparent/non tissé 7 x 9 cm - 100 pcs.

08/10/2025 10:34:13



Numéro d'article	040696
Prix HT	47,96 €
Prix TTC	58,03 €
Stock	Plus que 2 en stock

Description

L'Evercare Comfort IV non tissé est un sparadrap spécialement adapté à la fixation des canules intraveineuses et des lignes centrales.

Pansement IV de confort avec film et matériau non tissé

Comme le plâtre recouvre la perfusion ou la canule d'un film transparent, il est possible d'inspecter en permanence l'orifice d'insertion. Le film est imperméable aux virus et aux bactéries. L'emplâtre pour infusion est facile à utiliser grâce à sa méthode d'application simple avec une fente. Les bandes de rétention non tissées (lâches) le long de la fente simplifient l'application et garantissent que la canule ou le cathéter est maintenu en place de manière sûre et étanche. Le joint hermétique garantit une stérilité maximale de l'emplâtre pour perfusion IV. En combinaison avec ces patches de perfusion IV de haute qualité et [notre gamme de cathéters](#), le brochage devient une tâche facile.

Utilisation du sparadrap non tissé Comfort IV

- Retirez la plus grande feuille de protection de la couche adhésive. Utilisez les deux bandes latérales pour une application facile sur la plaie.
- Appliquez le film sparadrap pour perfusion IV sur la plaie sans tension.
- Retirez ensuite la feuille de support des bandes latérales et pressez le film sur la peau autour de la plaie.
- Maintenant, retirez également la couche supérieure de protection en tirant doucement sur les deux extrémités qui dépassent dans le sens des flèches vertes.
- Lorsque vous retirez le plâtre, décollez soigneusement le pansement de la peau à partir des coins, en soutenant la peau avec votre main libre. Retirez le film parallèlement à la peau.
- Le pansement intraveineux peut rester en place jusqu'à 7 jours.

Ligne de produits Evercare

Cette gamme de produits comprend des alternatives de haute qualité aux matériaux traditionnels à un prix plus favorable. Pansements pour perfusion IV, pansements pour îlots et toutes sortes de matériaux pour le soin des plaies. Les produits d'Evercare répondent aux normes CE, EO, EN et aux directives strictes des exigences de qualité ISO. Tous les produits Evercare sont soumis à un processus de contrôle de qualité approfondi. Cela comprend une inspection régulière des installations de production ainsi que des tests aléatoires.