

Numéro d'article	040203
Prix HT	7,37 €
Prix TTC	8,92 €
Stock	en stock

Description

Le pansement sur rouleau Evercare en rouleau est constitué d'un matériau non tissé souple avec un tampon absorbant central.

Pansement pour plaie enroulée avec coussin de plaie non adhésif

Le pansement Evercare en rouleau est composé d'un matériau non tissé blanc et doux avec un tampon absorbant central. Le tampon absorbant est doté d'un matériau non adhésif qui l'empêche de coller à la plaie. Conçu pour être utilisé pour la protection et la guérison de petites blessures superficielles. Ne convient pas aux plaies qui saignent abondamment, qui sont profondes ou infectées.

Parfaitement adhésif et peut être coupé à la bonne taille

Ce pansement auto-adhésif en rouleau, respectueux de la peau, peut être retiré de la peau et des cheveux sans laisser de résidus. Le sparadrap en rouleau mesure 5 m de long et peut donc être facilement coupé à la bonne taille pour s'adapter à la plaie. Vous avez donc toujours la bonne taille à portée de main.

Caractéristiques du pansement sur rouleau

- pansement élastique, blanc, non tissé, respirant, en rouleau
- fabriqué en 100% polyester non tissé
- hypoallergénique
- avec adhésif polyacrylate

- pansement non-adhérent
- pour les peaux sensibles
- s'enlève de la peau et des cheveux sans laisser de résidus d'adhésif
- sans latex

Indication

Utilisé pour la protection et la guérison de petites blessures superficielles.

Comment utiliser un pansement sur rouleau?

Pour traiter correctement une plaie, il est important d'avoir les mains propres et un environnement propre à tout moment. Nettoyez ensuite la plaie avec de l'eau et un désinfectant. Découpez un morceau de plâtre dans le rouleau, en fonction de la taille de la plaie. Retirez ensuite la feuille de protection d'un côté du plâtre, en veillant à ne pas toucher le tampon. Placez le plâtre avec précaution sur la plaie et retirez la deuxième feuille de protection.