



Inadine pansement non adhérent 9,5 x 9,5cm (10 pièces) - Imprégné d'une base de polyéthylène glycol contenant de la povidone iodée

08/10/2025 13:54:15



Numéro d'article	000456
Prix HT	14,05 €
Prix TTC	17,00 €
Stock	en stock

Description

Pansement non adhérent Inadine 9,5 x 9,5 cm (10 pièces)

QU'EST-CE QUE C'EST?

Le pansement non adhésif INADINE™ PVP-I se compose d'un matériau en viscose tricoté à peine adhérent, imprégné d'une base de polyéthylène glycol (PEG) contenant 10 % de povidone iodée, correspondant à 1,0 % d'iode.

INDICATIONS D'UTILISATION

INADINE™ est indiqué pour le traitement des plaies ulcéreuses et peut également être

utilisé pour la prévention des infections dans : - Brûlures moins sévères - Les abrasions traumatiques moins sévères. Sur la base d'études cliniques, il a été démontré que INADINE™ peut également convenir au traitement des plaies chroniques, notamment : - Ulcères de la jambe de causes diverses - Ulcères diabétiques sur le pied - les ulcères de pression.

MODE D'EMPLOI

AVANT L'APPLICATION Se référer au mode d'emploi. Choisissez une taille INADINE™ légèrement plus grande que la plaie. Préparez la plaie conformément au protocole de traitement de la plaie correspondant. Assurez-vous que la peau autour de la plaie est sèche. Retirez le pansement de la boîte. Préparer le pansement 1. Si nécessaire, INADINE™ peut être coupé à la bonne taille avec des ciseaux propres ou plié. 2. Cette opération est plus facile si l'un ou les deux papiers de couverture d'INADINE n'ont pas encore été retirés. Application du pansement 1. Retirez l'un des papiers de couverture. 2. Retirez le pansement de l'autre papier de couverture et placez INADINE™ directement sur la plaie. Application du pansement secondaire 1. Recouvrir INADINE™ d'un pansement secondaire, par exemple GENTLE BORDER™. Choisissez le pansement secondaire en fonction de la quantité d'exsudat. Enfin, vous pouvez appliquer une couverture supplémentaire ou un pansement de rétention/compression. Changement ou retrait du pansement 1. Si la couleur du pansement INADINE™ s'estompe, l'efficacité antiseptique a diminué et le pansement doit être changé. Au début du traitement ou en cas de plaies gravement infectées ou fortement exsudatives, il peut être changé jusqu'à deux fois par jour. 2. Retirez soigneusement le pansement secondaire. 3. Le retrait d'INADINE™ peut être facilité en tirant doucement sur deux pansements diagonalement opposés l'un à l'autre.

CARACTÉRISTIQUES D'INADINE:

Fiable : INADINE™ est un pansement fiable, efficace et non adhérent pour traiter la contamination bactérienne et prévenir les infections des plaies chroniques et aiguës. **Efficace :** l'iode de povidone possède une large activité antimicrobienne^{1,2} et s'est révélée efficace contre le SARM33. **Non adhérent :** INADINE™ minimise l'adhérence à la plaie et réduit donc le risque d'endommager le tissu de granulation lors du retrait du pansement. Dans la pratique clinique, il a été démontré que le pansement réduit la douleur du patient.