



Numéro d'article	020160
Prix HT	2,30 €
Prix TTC	2,78 €
Stock	en stock

Description

Instant ColdPack à usage unique

Comment utiliser Instant Cold pack ?

- Pétrir fermement le Cold Pack pour que le contenu puisse bien se mélanger.
- Bien agiter pendant 10 secondes.
- Enveloppez le Cold Pack dans une serviette et placez-le contre une partie du corps blessée.
- Après utilisation, jeter à la poubelle.

Composition: eau et uréum