



|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>Numéro d'article</b> | 023331       |
| <b>Prix HT</b>          | 53,33 €      |
| <b>Prix TTC</b>         | 64,53 €      |
| <b>Stock</b>            | sur commande |

## Description

Pansement d'alginate très absorbant avec des fibres CMC et de l'argent ionique.

## Melgisorb<sup>®</sup> Ag : absorption supérieure dans des conditions difficiles

Absorbe jusqu'à 45 % plus de liquide que le pansement hydrophile à l'argent le plus couramment utilisé et tue les bactéries jusqu'à 4 jours. L'excellente résistance des fibres d'alginate à l'état humide empêche les fibres d'alginate de se décomposer dans le lit de la plaie. Ceci permet d'enlever complètement le pansement.

## Indications

Melgisorb<sup>®</sup> Ag est indiqué pour traiter des plaies superficielles ou profondes, modérément ou fortement exsudatives telles que : • plaies post opératoires • plaies traumatiques (lésions du derme, blessures traumatiques ou incisions) • ulcères de jambe • escarres • ulcères diabétiques • sites donneurs et de greffons • brûlures au second

degré Ce produit peut également être utilisé sous des bandages compressifs. Dans la mesure où le produit contient un alginat, il peut contribuer au contrôle des hémorragies mineures issues de plaies superficielles. Melgisorb Ag peut être utilisé dans le traitement de plaies infectées ou présentant un risque élevé d'infection, sous le contrôle d'un professionnel de santé qualifié. Melgisorb Ag est réservé à l'usage externe.

## Remarque

Melgisorb<sup>®</sup> Ag peut rester en place jusqu'à 7 jours. La fréquence de renouvellement du pansement dépend de l'état de la plaie et de l'importance de l'exsudat. Dans un premier temps, il peut être nécessaire de changer le pansement toutes les 24 heures. Si la plaie semble sèche, saturer le pansement avec une solution saline stérile avant de le retirer. Retirer délicatement le pansement du lit de la plaie. Irriguer le site de la plaie conformément aux protocoles standard avant d'appliquer un nouveau pansement.

## Contre-indications

Ne pas utiliser Melgisorb<sup>®</sup> Ag dans les cas suivants : • chez des patients présentant une allergie connue aux alginates ou à l'argent • sur des implants chirurgicaux • pour contrôler une hémorragie importante • en application directe sur des plaies sèches ou très légèrement exsudatives.

## Précautions

• Le pansement peut adhérer s'il est utilisé sur des plaies sèches ou très légèrement exsudatives. Si le pansement adhère et ne peut être retiré facilement, humidifier à l'aide d'une solution saline stérile avant le retrait. • L'efficacité du pansement peut être atténuée en cas d'utilisation excessive de pommades à base de pétrole. • Éviter le contact avec les électrodes ou les gels conducteurs au cours des mesures électroniques telles que les électrocardiogrammes (ECG) et les électroencéphalogrammes (EEG). • Retirer le pansement avant que le patient subisse une IRM ("Imagerie par Résonance Magnétique"). • En cas d'infection clinique, l'application locale d'argent ne doit pas se substituer à un traitement systémique ou à tout autre traitement anti-infectieux adapté.