


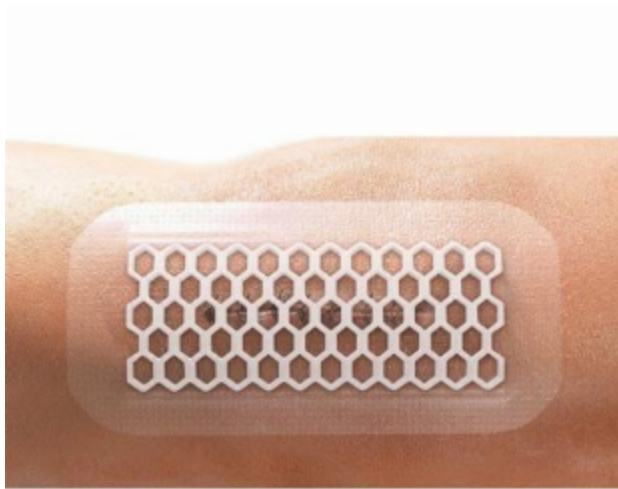

Numéro d'article	041049
Prix HT	48,26 €
Prix TTC	58,39 €
Stock	Plus que 8 en stock

Description

Le design unique et innovant d' OPSITE Post- Op Visible permet une surveillance constante des plaies sans perturber le processus cicatriciel dû à des changements de pansements inutiles. Une protection essentielle contre de la contamination bactérienne Fournit une barrière imperméable aux bactéries, y compris le SARM Des patients satisfaits Les patients ont jugé qu' OPSITE Post- Op Visible était très confortable et leur a donné confiance car ils se sentaient protégés du risque d'infection en particulier du SARM. Une prise en charge du site d'incision efficace OPSITE Post-Op Visible aide à fournir un équilibre entre un excès d' exsudat et la quantité de liquide nécessaire à une cicatrisation en milieu humide. Une surveillance continue Le design unique de la mousse en nid d'abeille permet une surveillance continue du site d'incision sans avoir à perturber le processus cicatriciel. Aide à prévenir l'apparition de phlyctènes Après une prothèse totale de hanche ou de genou, OPSITE Post-Op Visible a prouvé qu'il réduisait le taux d'apparition de phlyctènes de 14% à 8%. Comment appliquer OPSITE Post-Op Visible et quand le renouveler? OPSITE* Post-Op Visible est un pansement facile à appliquer et à ôter. Une fois placé sur la plaie, La découpe en nid d'abeille du pansement et son adhésif hypoallergénique assurent le confort de vos patients .

Etape 1

OPSITE Post-Op Visible - Step 1

- Sortir le pansement de son emballage
- Soulever le support n°1 rigide blanc imprimé orange

Etape 2

OPSITE Post-Op Visible - Step 2

- Tout en tenant le pansement par les parties non adhésives aux extrémités du pansement, appliquez le doucement sur l'incision ou la plaie

Etape 3

OPSITE Post-Op Visible - Step 3

- Lisser le pansement tout en appliquant une légère pression sur le pourtour
- En utilisant la partie non adhésive du support rigide, commencer à soulever le papier protecteur n°2

Etape 4

OPSITE Post-Op Visible - Step 4

- Lisser correctement le film
- Assurez-vous du confort de votre patient avec le pansement en place

Retrait

OPSITE Post-Op Visible - Removal

- Soulever un coin en l'étirant parallèlement à la plaie
- Relacher
- Recommencer cette opération tout autour du pansement

Quand renouveler le pansement ?

OPSITE Post-Op Visible absorbancy

Pas de changement nécessaire

OPSITE Post-Op Visible absorbancy 2

Pansement à renouveler

Renseignements supplémentaires

<u>Description</u>	<u>Emballage</u>
Op-Site Post-Op Visible 8x10cm	20 pièces
Op-Site Post-Op Visible 15x10cm	20 pièces
Op-Site Post-Op Visible 20x10cm	20 pièces
Op-Site Post-Op Visible 25x10cm	20 pièces