




Pansement membrane absorbant PolyMem Basic - Stérile - 10 x 10cm - 15 pièces

08/10/2025 18:57:25

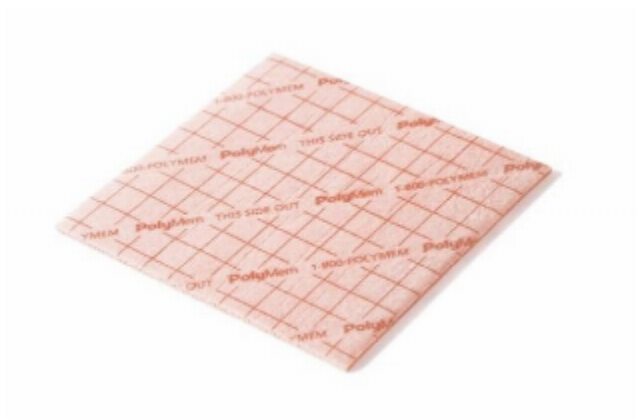

Numéro d'article	020794
Prix HT	108,58 €
Prix TTC	131,38 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Pansement membrane absorbant PolyMem Basic - Stérile - 10 x 10cm - 15 pièces

PolyMem est un pansement à membrane polymérique avancé qui permet de nettoyer la plaie, de soulager la douleur et de créer un environnement humide optimal pour la plaie. Un choix fiable pour le traitement des plaies

PolyMem est largement utilisé par les professionnels de la santé depuis 1995 pour aider les plaies à guérir plus rapidement et plus efficacement. Il permet un nettoyage actif de la plaie, réduit la douleur, atténue l'inflammation et crée un environnement optimal pour une guérison rapide. Il convient à tous les types de plaies et à tous les stades de cicatrisation (à l'exception des brûlures au troisième degré). Cette polyvalence en fait un choix précieux pour tout professionnel de santé.

Utilisation du pansement membrane PolyMem

- Nettoyer la plaie selon le protocole habituel.
- Appliquer le PolyMem sur la plaie, en veillant à ce qu'il y ait un chevauchement d'au moins 1 cm autour du bord de la plaie.
- Facultatif: marquer le bord de la plaie à l'extérieur du pansement, si nécessaire.

Instructions importantes

- Ne pas utiliser d'autres produits susceptibles d'interférer avec le contact entre le PolyMem et le lit de la plaie.
- L'irrigation de la plaie n'est pas nécessaire: Le nettoyant actif du PolyMem remplace ce processus. L'utilisation d'autres solutions de rinçage peut retarder la cicatrisation.

Ce à quoi il faut s'attendre lors de l'utilisation

- Au cours des premiers jours de traitement, la plaie peut temporairement produire plus d'exsudat ou même augmenter de taille. Ce phénomène est normal et est dû à l'effet « clean out », le processus de nettoyage initié par PolyMem.
- Plaie sèche: Si la plaie devient plus sèche, vous pouvez humidifier légèrement le pansement membrane PolyMem avec de l'eau pour réactiver les composants actifs du pansement.
-

Caractéristiques

- Découpable - Non adhésif - Maximum 7 jours.
- Absorbant (42 ml par 100 cm²/24h).
- Avec film supérieur (MVTR 1000 grammes/m²/24h).