



Numéro d'article	016148
Prix HT	37,97 €
Prix TTC	45,94 €
Stock	Plus que 9 en stock

Description

Prontosan[®] Wound Gel X est un hydrogel pour la prévention et le traitement des biofilms, infections, fibrinoplasties, nécroses et débris. Prontosan[®] Wound Gel X contient 2 ingrédients uniques qui, ensemble, sont extrêmement efficaces contre diverses couches indésirables dans une plaie. Contient de la bétaine, un surfactant qui peut briser les couches indésirables et permettre au polyhexanide de lutter contre la croissance bactérienne.

Avantages de Prontosan[®] Wound Gel X

- Temps de cicatrisation raccourci de 4 semaines en moyenne.
- Préviend et traite le biofilm par effet inhibiteur de croissance bactérienne.
- Préviend les infections.
- Favorise des changements de pansements indolores.
- Peut être appliqué avec n'importe quel bandage et s'adapte à n'importe quel protocole.

- Peut se conserver 8 semaines après ouverture.
- Réduit la douleur et les odeurs de plaie.
- Reste bien en place grâce à l'épaisseur du gel.

Indications du gel Prontosan[®] Wound Gel X

Prontosan[®] Wound Gel X pour la préparation et la décontamination du lit de la plaie peut être appliqué sur différents types de plaies telles que :

- Blessures causées par un traumatisme
- Plaies post-opératoires
- Plaies du pied diabétique
- Cruris d'ulcère, veineux et artériel
- Brûlures
- Blessures oncologiques

Utilisation de Prontosan[®] Wound Gel X

Prontosan[®] Wound Gel X peut être utilisé pour les plaies superficielles, mais aussi dans les cavités et les plaies avec un effet sapant. Appliquez un pansement secondaire pour maintenir le gel Prontosan[®] Wound Gel X en place. Tant que le gel est visible dans la plaie, il est efficace. Changer le pansement dès qu'il est saturé ou en cas de fuite imminente.