



Spycra Roll Film de polyuréthane auto-adhérente et transparente - 10cm x 5m

08/10/2025 20:36:39

Numéro d'article	020792
Prix HT	57,34 €
Prix TTC	69,38 €
Stock	Plus que 3 en stock

Description

Spycra Roll: Film de polyuréthane auto-adhérente et transparente avec une surface en silicone développé avec "ReSkin Silicone Skin Technology", une technologie unique brevetée.

Description du produit

Spycra Roll est un film de polyuréthane mince, transparent, doté d'une surface en silicone souple et auto-adhérente conçu pour protéger les peaux fragiles et sensibles. Spycra Roll minimise le risque d'altération de la peau. Spycra Roll est très conformable et s'adapte bien aux surfaces irrégulières et aux différents contours du corps. Il fournit un revêtement transparent et flexible protégeant la peau ou la plaie du patient contre les contaminations externes (microbienne, effluents...). Spycra Roll a des propriétés respirantes et favorise le processus de cicatrisation basé sur le principe de la cicatrisation en milieu humide. Spycra Roll n'est pas absorbant. Spycra Roll peut être utilisé seul ou en association avec d'autres pansements. Spycra Roll peut être coupé sur mesure et est adapté pour le soin de zones à taille variable.

ReSkin Silicone Skin Technology “

ReSkin Silicone Skin Technology” est une combinaison unique brevetée de matériaux élastiques et d'une couche de silicone souple auto-adhésive sur une des faces du pansement. “ReSkin Silicone Skin Technology” est intégré à Spycra Roll; un Film de polyuréthane conformable qui n'adhère pas à la plaie minimisant les traumatismes et la

douleur lors du retrait du pansement. Lorsqu'il est utilisé sur une peau fragile, Spycra Roll assure une adhérence douce sur la peau, permettant ainsi des changements de pansement sans douleur ni dermabrasion. Grâce à la "ReSkin Silicone Skin Technology", Spycra Roll est principalement indiqué pour le soin préventif de peaux fragilisées. En plus, Spycra Roll peut être utilisé pour le soin des plaies superficielles peu exsudatives où le confort du patient est essentiel (retrait du pansement sans douleur et soutien de la cicatrisation).

Mode d'action

Spycra Roll est conçu pour protéger les peaux fragiles et sensibles. Spycra Roll minimise le risque d'altération de la peau. Spycra Roll est très conformable et s'adapte bien aux surfaces irrégulières et aux différents contours du corps. Il fournit un revêtement transparent, flexible protégeant la peau ou la plaie du patient contre les contaminations externes (microbienne, effluents...). Spycra Roll a des propriétés respirantes et favorise le processus de cicatrisation basé sur le principe de la cicatrisation en milieu humide.

Indications

- Pansement primaire pour protéger les peaux fragiles et sensibles afin de minimiser le risque d'altération de la peau.
- Film protecteur afin de protéger la peau ou la plaie contre une contamination microbiologique ou autre et contre des infiltrations de toute sorte de fluides.
- Pansement secondaire afin de fixer des compresses de gaze et des écouvillons non tissés.

Mode d'emploi

1. Lavez les mains avant les soins
2. Nettoyez soigneusement la peau ou la plaie et séchez-la soigneusement.
3. Appliquez une compresse absorbante si besoin.
4. Choisissez une taille adaptée pour couvrir toute la surface de la peau à protéger. En cas de plaie, choisissez une taille qui couvre la blessure et la peau environnante avec un débord de 2 cm.
5. Tenez le Spycra Roll avec la couche de protection transparente vers le haut et retirez la couche de protection.
6. Tenez Spycra Roll par les deux languettes vertes et appliquez Spycra Roll sur la peau fragile ; lissez doucement Spycra Roll pour assurer une bonne étanchéité.
7. Retirez les deux languettes vertes et lissez doucement Spycra Roll une fois de plus.

Remarque: Assurez-vous que Spycra Roll n'est pas étiré. Si nécessaire, En cas d'indication clinique, les traitements topiques avec des corticostéroïdes et des antimicrobiens ou des hydrogels peuvent être appliqués sous Spycra Roll. Lors de l'application d'hydrogel, ou de topiques, l'adhérence de Spycra Roll peut être

compromise.

Pour retirer

Spycra Roll Soulever un coin du pansement et décoller doucement le film de la peau.

Précautions d'emploi

Spycra Roll ne peut être utilisé comme pansement primaire sur des plaies profondes.

Une peau humide ou une transpiration importante diminueront l'adhérence de Spycra

Roll. Avant d'appliquer le Spycra Roll, assurez-vous que la peau soit complètement sèche.

En prenant un bain, éviter le contact de Spycra Roll avec l'eau.

Contra-indications

Spycra Roll ne peut être utilisé comme produit de fixation primaire pour des dispositifs intraveineux, les canules, les orifices ou autres dispositifs d'infusion et/ou maintien de la vie.