



Numéro d'article	0106081
Prix HT	7,42 €
Prix TTC	8,98 €
Stock	en stock

Description

Une valve de cathéter est une sorte de robinet qui peut être connecté à votre cathéter. La valve de cathéter Flip Flo est utilisée pour fermer temporairement un cathéter, avec option de vidange. La valve de cathéter Flip-Flo convient pour la vidange de la vessie chez les patients avec cathéters et cathéters suprapubiens. Il peut être utilisé pendant la journée pour remplacer un sac urinaire. La Flip Flo réduit le risque de réduction de la capacité vésicale et des infections. Cet article est recommandé à toute personne qui peut sentir une vessie pleine, qui est mentalement consciente et qui peut actionner la valve elle-même.

Avantages d'une valve de cathéter Flip-Flo

- Une valve de cathéter est discrète et confortable à utiliser.
- En utilisant la valve du cathéter, la vessie conserve sa fonction normale de stockage.

Utilisation d'une valve de cathéter

- Videz la vessie régulièrement selon la prescription du médecin. Cela se produit généralement autour de 3 à 4 heures. Vider également la vessie avant d'avoir des selles. Ceci empêchera les fuites de l'extérieur du cathéter dues au pressage.
- Lavez-vous les mains avant et après avoir utilisé la valve du cathéter.
- Ouvrez la valve du cathéter en poussant le levier gris vers le bas.
- Laissez l'urine s'écouler dans les toilettes ou dans un récipient.
- Fermez la valve du cathéter en poussant le levier gris vers le haut.
- Nettoyer le tuyau flexible à l'eau tiède.

Remplacement de la valve du cathéter

- Lavez-vous et séchez-vous soigneusement les mains.
- Ouvrez l'emballage.
- Tenez le cathéter d'une main et pliez-le (comme un tuyau d'arrosage) de façon à ce que l'urine ne puisse s'écouler.
- Débranchez la valve de cathéter usagée du cathéter.
- Désinfecter le point de connexion du cathéter avec de l'alcool.
- Prenez la valve propre du cathéter avec l'autre main et connectez-la au cathéter.
- Jetez la valve de cathéter usagée dans la poubelle.