

Sac à urine HEKURA pour plusieurs journées - 2000ml - 10 pièces

08/10/2025 20:36:38



Numéro d'article	182025
Prix HT	12,35 €
Prix TTC	14,94 €
Stock	en stock

Description

Sac à urine HEKURA pour plusieurs journées - 2000ml - 10 pièces Sac de nuit / sac de lit avec robinet croisé pour une utilisation de plusieurs jours. - Peut être utilisé pendant 7 jours maximum - 2000 ml, graduation indiquée à titre indicatif - Diamètre de tuyau extra épais de 9,5 mm - Clapet anti-retour - Equipé d'un connecteur fixe - Le tuyau peut être raccourci à la longueur souhaitée, un connecteur séparé peut être commandé à cet effet (UZ 5555) - PVC et PE, ne contient pas de FTTAat " À utiliser avec un cathéter résidentiel, un cathéter simple, un cathéter à préservatif externe ou connecté en combinaison avec un sac de jambe.

Instructions pour l'utilisation

1. Lavez-vous soigneusement les mains.
2. Option: coupez le tube à la longueur désirée et fixez le connecteur fermement sur le tube de la poche urinaire.
3. Ôtez le capuchon de protection vert du connecteur et veillez à ce que le robinet soit fermé.
4. Connectez la poche urinaire au cathéter ou à la poche de jambe au moyen d'un raccord. En cas de réutilisation en combinaison avec une poche de jour déconnectez, rincez (éventuellement avec quelques gouttes de vinaigre) et laissez sécher la poche urinaire après chaque utilisation avant de la réutiliser.
5. Fixez la poche urinaire à l'aide d'un matériel de fixation à l'endroit désiré sur la jambe ou à l'aide d'un crochet de suspension au lit.
6. Ouvrez le robinet pour vider la poche. Après vidange, nettoyez l'extrémité du robinet.
7. Faites glisser le robinet en croix de l'autre côté pour vider la poche urinaire. Faites glisser le robinet en croix dans l'autre sens jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre pour fermer la poche urinaire.
8. Rabattez le robinet à levier vers le bas pour vider la poche urinaire. Rabattez le robinet à levier vers le haut pour fermer la poche urinaire.
9. Assurez-vous toujours que le tube n'est pas coudé

Afbeeldingen

