



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 010176      |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 64,49     |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 78,03     |
| <b>Voorraad</b>        | op voorraad |

## Omschrijving

---

Een grippernaald is een injectienaald, speciaal ontworpen voor het aanprikken van een poortkatheter.

## Wat is een grippernaald?

De grippernaald heeft een afwijkende, licht gebogen vorm met de opening aan de zijkant en niet aan de punt. Daardoor is het een niet-borende/stansende naald. Voor een poortkatheter kan geen normale injectienaald gebruikt worden, want dan raakt het membraan van de poortkatheter lek.

## Hoe werkt een Port-A-Cath?

De katheter wordt ingebracht in een grote ader in de borst en vervolgens opgeschoven tot de kathetertip een punt bereikt heeft precies boven het hart. Het reservoir komt onder de huid te liggen. Als de wondjes van het inbrengen genezen zijn, kunt u het reservoir zien en voelen als een harde bobbel onder uw huid. Om toegang tot het

systeem te krijgen wordt een speciale Port-A-Cath Grippernaald door de huid en door het siliconenmembraan geprikt tot op de bodem van het reservoir. U voelt dit als een kleine prik. Op de naald wordt een infuus aangesloten. Medicijnen en vloeistoffen gaan door het infuus, via de Port-A-Cath-naald in het Port-A-Cath-reservoir via de katheter naar het bloedvat en zo naar de rest van het lichaam. Ook kan bloed worden afgenomen via de Port-A-Cath. Dit gebeurt alleen bij uitzondering, omdat dit de kans op infectie of stolsels via de Port-A-Cath vergroot.

## Onderhoud van uw port-a-cath of heparineslot

De Port-A-Cath moet doorgespoten worden met natriumchloride 0.9% oplossing (een zoutoplossing) en heparine (een antistollingsmiddel) om te voorkomen dat de katheter verstopt raakt door een bloedstolsel. Door het doorspuiten van de Port-A-Cath ontstaat een zogenaamd heparineslot. De Port-A-Cath moet na elke gebruik doorgespoten worden met natriumchloride 0.9% oplossing en heparine.

### Specificatie van de grippernaald

- 90 graden gebogen
- van roestvrijstaal
- fixatieplaatje
- verlengslang van PVC
- luer-lock aansluiting
- lengte slang 19cm
- verschillende afmetingen van naald
- steriel verpakt

### De Grippernaalden zijn verkrijgbaar in onderstaande afmetingen:

- 19G x 19 mm
- 19G x 25 mm
- 20G x 19 mm
- 20G x 25 mm
- 20G x 32 mm
- 22G x 25 mm