



Artikelnummer	010296
Prijs excl. BTW	€ 42,31
Prijs incl. BTW	€ 51,20
Voorraad	Nog slechts 7 op voorraad

Omschrijving

Deze Perifere IV-katheter BD Insyte bestaat uit een polyurethaan katheter met daarin een naald die het aanprikken mogelijk maakt. Na het aanprikken wordt de naald verwijderd en blijft de katheter ter plaatse in de vene. De dikte van de katheter wordt uitgedrukt in gauge (G). Hoe hoger de gaugewaarde, hoe fijner de naald. Aan het uiteinde van de naald is er een visualisatiekamer. Hierin wordt een bloeddruppel zichtbaar wanneer de naald in de vene zit. Na het aanprikken van het bloedvat wordt de invoernaald een beetje verder in de vene gebracht zodat ook de katheter in de vene zit. Vervolgens wordt de naald verwijderd en blijft de katheter ter plaatse.

Perifere intraveneuze katheters in Vialon

- Steriel, éénmalig gebruik, latexvrij.
- De BD Insyte™ katheter is vervaardigd van radio-opaak BD Vialon™, hemocompatibel biomateriaal, en staat borg voor uitstekende penetratie, tip integriteit en tolerantie.

- Vlot aanprikken: de grote weerstand van Vialon™ (Polyurethaan) maakt de vervaardiging van een fijnere, sterkere en betrouwbare kathetertip mogelijk, met een gemakkelijke penetratie. Er is 50% minder kracht nodig dan met de traditionele katheters in teflon.
- Tip integriteit: de mechanische eigenschappen van Vialon™ voorkomen opstropen en vervorming van de tip bij het aanprikken.
- Tolerantie: eenmaal in het lichaam ingebracht, wordt de aanvankelijk rigide katheter soepeler. Samen met de biocompatibiliteit van Vialon™ en de tip integriteit verklaart deze aanvullende eigenschap het lagere risico op tromboflebitis.
- Debiet: de dunne wand van de katheter maakt met een identieke buitendiameter een hoger debiet mogelijk. De knikresistentie van Vialon™ garandeert het behoud van een optimaal debiet (bv.: BD Insyte™ 18G; 106ml/mn).

Aanbevelingen

- Gebruikelijke perifere toegang ook bij broze venen en lage veneuze druk.

Sterilisatie

- Ethyleenoxide (E.T.O.)