

Micro-Fine pennaald - 31G x 5mm (EasyFlow+PentaPoint) - 100 stuks

09/10/2025 00:25:32



Artikelnummer	010113
Prijs excl. BTW	€ 15,61
Prijs incl. BTW	€ 18,89
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Het gamma BD Micro-Fine™ **NIEUW: BD Micro-Fine™ + 6 mm** Uitbreiding van de BD Micro-Fine familie pennaalden – nieuwe lengte, zelfde kwaliteit en betrouwbaarheid. Bijna 30% van de mensen met diabetes gebruikt een 6 mm pennaald. Vanaf nu kunnen zij de BD 6 mm insuline pennaald gebruiken. Naast de vertrouwde 4, 5 en 8 mm BD Micro-Fine™ insuline pennaalden is de BD Micro-Fine™ + 6 mm pennaald nu ook beschikbaar op de Benelux markt! BD Micro-Fine pennaalden zijn 100% compatibel met alle injectiepenen voor de behandeling van diabetes. **BD Micro-Fine™ + 6 mm pennaald**

- (Ø 0,25mm – 31G)
- "Thinwall"
- BD Product Code : 320734
- Kleur : Oranje
- Verpakking : 100 stuks

Kenmerken BD Micro-Fine™ + 6 mm pennaald:

- Micro-Fine is ontworpen voor een comfortabele injectie en aangename ervaring
- Micro-Fine is ontworpen om de volledige insulinedosis te injecteren zonder verstopping, blokkage of lekkage
- Micro-Fine heeft een elektrolytisch-gepolijste, chirurgische kwaliteitsnaald ontworpen voor extra gladheid

BD Micro-Fine Ultra™ 4 mm pennaald BD Micro-Fine Ultra™ 4 mm met PentaPoint™ comfort (5-punt slijping voor betere penetratie) en EasyFlow™ technologie (voor een betere doorstroming van insuline)

- (Ø 0,23mm – 32G)
- "Extra Thinwall"
- BD Product Code : 320584
- Kleur : Groen
- Verpakking : 100 stuks

Bekijk ook onze brochure : BD Micro-Fine Ultra BD Micro-Fine Ultra EasyFlow™ technologie voor een nóg betere injectie-ervaring:

- 62% minder drukkracht nodig voor een injectie
- 60% snellere insuline doorstroming
- 35% minder lekkage uit de huid
- 38% minder lekkage uit de pen

Het BD Micro-Fine™+ pennaalden gamma bestaat verder uit volgende naaldlengtes: 5 mm en 8 mm. **BD Micro-Fine™+ 5 mm pennaald met PentaPoint™ comfort** (5-punt slijping voor betere penetratie) en EasyFlow™ technologie (voor een betere doorstroming van insuline)

- (Ø 0,25mm – 31G)
- "Thinwall"
- BD Product Code : 320586
- Kleur : Purper
- Verpakking : 100 stuks

BD Micro-Fine™+ 8 mm pennaald

- (Ø 0,25mm – 31G)
- "Thinwall"
- BD Product Code : 320792
- CNK Code : 2210-094
- ZI Code : 15029034
- Kleur : Blauw

- Verpakking : 100 stuks

Praktische informatie:

- De CNK en ZI code zijn de nationale codes die de apotheek gebruikt om de BD Micro-Fine naaldjes te bestellen bij de groothandel.
- De ZI code is tevens de basiscode voor declaraties bij de zorgverzekeraars.
- De BD Micro-Fine pennaalden kunnen ook aangekocht worden via de patientenverenigingen.
- De BD Micro-Fine pennaalden zijn NIET VERGOED in België
- De BD Micro-Fine pennaalden zijn VERGOED in Nederland
- De BD Micro-Fine pennaalden zijn 100% compatibel met alle injectiepenen voor de behandeling van diabetes
- De BD Micro-Fine pennaalden zijn steriel materiaal en mogen dus maar één keer gebruikt worden.
- Hergebruik is steeds op eigen risico.

Afhankelijk van de naaldlengte die u gebruikt, wordt een bepaalde injectietechniek geadviseerd. Dit om er zeker van te zijn dat de insuline steeds subcutaan geïnjecteerd wordt. Bij het gebruik van de 4 mm of 5 mm BD Micro-Fine pennaald, adviseert BD een loodrechte injectie zonder huidplooi. Bij het gebruik van een 6 of 8 mm BD Micro-Fine naald, adviseert BD een huidplooi.

Extra Informatie

Verbeter uw injectietechniek met de nieuwste innovatie van BD Bij aankoop van een doos pennaalden BD Micro-Fine Ultra™ 4mm, BD Micro-Fine™ + 5mm, BD Micro-Fine™ + 6mm en BD Micro-Fine™ + 8mm krijgt u - middels een unieke code die in de verpakking zit - toegang tot BD and Me. BD and Me is een online leerprogramma speciaal ontwikkeld voor patiënten over injectietechniek. Het bestaat uit verschillende modules (geanimeerde video's) die 24/7 toegankelijk zijn van thuis uit op pc, tablet of smartphone. Uit recent onderzoek blijkt dat een optimale injectietechniek net zo belangrijk is als voeding, insuline en beweging om gezond te blijven. Patiënten die een correcte injectietechniek hanteren:

- Verlagen hun HbA1c waarden met 0.5%
- Verminderen hun insulineverbruik tot 10.1 eenheden
- Vertonen minder complicaties

Ontdek BD and Me™ vandaag nog om uw injectietechniek te verbeteren!