



Artikelnummer	170078
Prijs excl. BTW	€ 16,84
Prijs incl. BTW	€ 20,38
Voorraad	Nog slechts 9 op voorraad

Omschrijving

De Accu-Chek[®] FastClix is het eerste opneemapparaat dat met één klik bloedmonsters mogelijk maakt. Vanaf nu is het bewapenen en prikken slechts een enkele klik nodig! De Accu-Chek FastClix prikken is de eerste prikken met een éénklikstelsysteem en een lancettenhouder. De unieke technologie zorgt voor snel, eenvoudig en nagenoeg pijnloos prikken. De draaibare kap heeft elf diepte-instellingen waarmee je het apparaat kunt instellen op uw huidtype. De prikken heeft een houder met zes voorgevulde lancetten, zodat je de lancetten niet apart hoeft te hanteren.

VOORDELEN EN EIGENSCHAPPEN

- Snel en gemakkelijk prikken met één klik
- Laadschuifje voor het gemakkelijk selecteren van een nieuw lancet
- Draaibare kap met elf diepte-instellingen voor verschillende huidtypen
- Lancettenhouder is voorgeladen met zes lancetten zodat je geen naalden hoeft aan te raken

- Het venster naast het laadschuifje toont het aantal resterende lancetten in de houder
- Geen naaldcontainer nodig
- Minder kans op onbedoeld prikken
- Dankzij de Clixmotion technologie wordt de lancetbeweging gestuurd met minimaal trillen en draaien voor comfortabel prikken
- Toelopende, drievlaks gesneden punt met optimale hoeken, 30G (0,3 mm) lancetten
- AST functie (alternatieve prikplaatsen) is op verzoek verkrijgbaar

HOE DE ACCU-CHEK FASTCLIX PRIKPEN TE GEBRUIKEN?

Met de Accu-Chek FastClix prikpen kan je aanspannen en prikken met slechts één en dezelfde knop. Voor het verkrijgen van bloed moet je je handen met warm water en zeep wassen en goed afdrogen. Lancettenhouder plaatsen Trek het dopje van de prikpen Schuif de nieuwe lancettenhouder in de prikpen Plaats het dopje weer op de prikpen Instellen van de prikdiepte Je kunt de prikdiepte van het lancet op 11 standen (van 0,5 tot 5,5) instellen. Het zilveren streepje (markering van de prikdiepte) op de prikpen geeft de ingestelde prikdiepte Verkrijgen van een bloeddruppel Druk de prikknop geheel in en laat los. Nieuw lancet gereed maken voor gebruik Beweeg het hendeltje aan de zijkant van de prikpen zo ver mogelijk naar links en vervolgens weer naar rechts. Het volgende lancet is nu gereed voor gebruik. Het weergavevenster naast het hendeltje geeft het aantal nog beschikbare lancetten weer.