



Alcoholtester voor smartphones - Alcovisor CLICK - TOT EINDE VOORRAAD

08/10/2025 14:17:54



Artikelnummer	250929
Prijs excl. BTW	€ 67,82
Prijs incl. BTW	€ 82,06
Voorraad	Nog slechts 2 op voorraad

Omschrijving

De Alcovisor CLICK is een alcoholtester die past op jouw smartphone! Kent u dat? Je drinkt op een avond 2, 3 ... drankjes en wil wel eens weten of je nog mag rijden. Met de CLICK kun je gedurende de avond bijhouden wat je alcoholpromillage is na elk drankje. De testresultaten worden - als u wilt - bewaard op uw telefoon. Bij elk resultaat kunt u een opmerking maken, bijv. "Na 1 glas champagne en 1 glas wijn". Op die manier kun je jezelf beter leren kennen. Het toestel berekent ook hoelang het duurt tot de wettelijke limiet is bereikt en wanneer alle alcohol uit uw lichaam is verdwenen.

Hoe werkt de alcoholtester voor smartphones?

Download gratis de Alcovisor app van de App Store of Google Play. Open de app, verbind uw Click via de audiopoort met uw telefoon en plaats een mondstuk. Zodra u ready op het scherm ziet staan, blaast u ca. 5 seconden door het mondstuk en drukt u de kleine knop aan de lange zijde in. Het toestel zegt "klik" waarna u na enkele seconden het resultaat ziet verschijnen.

Belangrijkste eigenschappen van Alcovisor - alcoholtester:

- Compact, klein formaat, dus makkelijk weg te steken in broekzak of handtas.
- Nauwkeurig, dankzij de elektrochemische sensor
- Gemakkelijk in gebruik
- Handig opberghoesje van rubber, waarin tevens een mondstuk kan worden opgeborgen

OPGELET: De App werkt bij Anroid enkel vanaf OS 4.2. / Voor iPhone geldt iOS 5.1 als minimum vereiste (Sommige recente iPhone hebben geen audiopoort en daardoor kan deze alcoholtester dus helaas niet gebruikt worden)

Technische informatie

Sensor	Elektrochemische (Fuel cell)
Meeteenheid	‰
Meetbereik in promille	0,00 - 3,00
Nauwkeurigheid	± 10% bij 1,00 ‰
Afmeting (hxbxd in cm)	7,8 x 4,8 x 1,6
Gewicht	23,6 g
Omgevingstemperatuur	Gebruik: 0°C tot 45°C
Opwarmingstijd (1e test)	< 30 sec
Ademmonster	4-5 sec. continue en gelijkmatig blazen
Controle ademmonster	Ja
Analysetijd	< 10 sec bij 1,00 ‰
Hersteltijd	15-30 seconden afhankelijk van hoeveelheid alcohol
Display	Via smartphone
Geheugenplaatsen	Ja, in principe onbeperkt
Weergave aantal testen	Ja
Stroomvoorziening	knoopbatterij CR1025
Mondstukjes	Code: MSCL05, MSCL25
Kalibratie	Na 1 jaar of 500 testen

Afbeeldingen

