



|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>   | 125205                    |
| <b>Prijs excl. BTW</b> | € 34,67                   |
| <b>Prijs incl. BTW</b> | € 41,95                   |
| <b>Voorraad</b>        | Nog slechts 4 op voorraad |

## Omschrijving

Wegwerphuls voor digitale thermometer - 1000st

Thermometerhulsen voor rectale, orale en axillaire temperatuurmetingen.

### Gebruiksaanwijzing

1. Plaats de thermometer in de binnenste huls van de thermometer.
2. Trek de thermometer met de binnenste huls uit de thermometer.
3. Meet de temperatuur met de beschermde thermometer. Noteer desgewenst op de buitenste afdekking - naam, ruimte, temperatuur en tijd.
4. Plaats de thermometer met de binnenste huls in de buitenste huls en lees de temperatuur af.
5. Verwijder de thermometer
6. Gebruikte huls weggooien