



Artikelnummer	023341
Prijs excl. BTW	€ 19,47
Prijs incl. BTW	€ 23,56
Voorraad	Nog slechts 4 op voorraad

Omschrijving

Decifera schuimverband in silicone met border is een niet verklevend, sterk absorberend verband met een siliconen wondcontactlaag.

Decifera NIEUW Wondzorg gamma

Decifera biedt een overzichtelijk assortiment aan kwalitatief hoogwaardige wondzorgproducten voor complexe wonden. Een duidelijk assortiment waaruit eenvoudig de juiste keuze gemaakt kan worden. Dat brengt eenvoud in complexe wondzorg. Het levert betrouwbare zorg op, die ook nog eens heel betaalbaar is. Daarom: Decifera, de slimste keuze bij complexe wonden.

Hoe werkt Decifera schuimverband in silicone met border?

Decifera Foam Silicone border is een niet verklevend, sterk absorberend schuimverband met een siliconen wondcontactlaag en PU film op de achterzijde. Decifera Foam Silicone border draagt bij aan een vochtig wondmilieu en bevordert zo een optimaal wondgenezingsproces. Het neemt overmatig wondexsudaat op in de kern van de sterk

absorberende polyurethaan schuimlaag. Een deel van het wondexsudaat verdampt door de polyurethaan film laag op de achterzijde. Dit vergroot de opnamecapaciteit van het verband waardoor verbandwisselingen tot een minimum worden beperkt.

Zo min mogelijk verbandwisselingen

Zo min mogelijk verbandwisselingen. Dat kan alleen bij goed exsudaat management, waarbij een hoge opnamecapaciteit een rol kan spelen. Met Decifera schuimverband in Silicone beschikt u over een product dat bijdraagt aan het genezingsproces en waarbij het aantal verbandwisselingen minimaal is. Aangenaam voor jouw en uw patiënt. De border van Decifera Foam Silicone heeft precies de juiste dikte. Hierdoor is het plakken van de border of verwijderen van plooien, wanneer dit nodig is, heel gemakkelijk!

Hoe gebruikt u Decifera schuimverband in silicone met border ?

Reinig de wonde altijd voordat u een verband aanbrengt. Het verband moet de droge omringende huid minimaal 1-2 cm bedekken en bij de grotere formaten 3-5 cm. Zoals de naam van het verband zelf vermeld is dit een schuimverband met kleefstrook "Border". Het schuimverband in silicone met border hoeft niet meer extra gefixeerd te worden. Mocht u het verband toch nog extra wensen te fixeren dan kan u dit steeds doen met een [op zichzelf klevende windel](#). Bespreek met uw arts of verpleegkundige hoe vaak er een verbandwissel dient plaats te vinden.