



Artikelnummer	023178
Prijs excl. BTW	€ 7,77
Prijs incl. BTW	€ 9,40
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Kendall Excilon AMD, niet-verklevend splitkompres met PHMB.

Gebruiken voor de verzorging van insteekopeningen bij gebruik van catheters en drains en ter voorkoming van wondinfectie.

Het steriele non-woven 6-laags splitkompres heeft 0.2% PHMB (polyhexamethyleen biguanide) als antimicrobieel bestanddeel. PHMB biedt weerstand aan bacteriële kolonisatie in het verband. PHMB vermindert het doordringen van bacteriën door het verband. Door de toevoeging van PHMB heeft het splitkompres een breed-spectrum werking; biedt bescherming tegen gram negatieve, gram positieve en sporenvormende micro-organismen inclusief MRSA (bacterie, methicilline resistent staphylococcus aureus) en VRE (bacterie, vancomycine resistente enterokok). Hierdoor wordt de besmetting naar

andere beperkt. Het splitkompres is niet-verklevend, zodat bij verwijdering de wond niet beschadigd wordt. Het kompres is voorzien van een split waarmee de catheter of drain goed omsloten kan worden.

Kendall Excilon AMD - eigenschappen:

- PHMB (polyhexamethyleen biguanide) - antimicrobieel
- biedt weerstand aan bacteriële kolonisatie
- vermindert doordringen bacteriën met breed spectrum
- beperkt kruis-contaminatie
- niet-verklevend; wond wordt niet beschadigd bij verwijdering
- 6-laags
- split zorgt voor goede omsluiting catheter of drain
- steriel
- 35 stuks per 2 verpakt.

Toepassing:

Voor de verzorging van insteekopeningen bij gebruik van catheters en drains en ter voorkoming van wondinfectie.

Hoe het splitkompres aanbrengen?

Vorbereiding:

- Was en desinfecteer uw handen volgens protocol.
- Verwijder overtollig haar voor het comfort van de patiënt.
- Reinig de huid rondom de tube, sonde of drain volgens protocol.
- Droog de huid rondom de tube, sonde of drain.

Aanbrengen:

- Haal het kompres uit de verpakking.
- Plaats het kompres met behulp van de split om de drain, tube of sonde met het bedrukte rooster naar boven.
- Fixeer het kompres met een hechtpleister.

Verwijderen:

- Controleer het kompres regelmatig; terwijl het kompres absorbeert gaat de afscheiding naar de bovenkant van het kompres en kan er verkleuring ontstaan.

- Wanneer de afscheiding zich naar de rand van het kompres verspreidt of als het kompres begint te lekken, moet het verband verschoond worden.
- Verschoon het kompres minstens om de 7 dagen of volgens het voorgeschreven protocol.
- Maak voorzichtig de hechtpleister los van de huid.
- Verwijder het kompres.
- Als het kompres aan de huid kleeft, dient het kompres met een gewone fysiologische zoutoplossing doordrenkt te worden en zachtjes los gemaakt te worden.

Afbeeldingen

