



Artikelnummer	023110
Prijs excl. BTW	€ 47,53
Prijs incl. BTW	€ 57,51
Voorraad	Nog slechts 3 op voorraad

Omschrijving

Exufiber is een uniek sterk absorberend, gelvormend vezelverband dat ontwikkeld is voor matig tot sterk exsuderende wonden en caviteiten. Het verband heeft een uitstekende retentiecapaciteit en een hoge structurele integriteit dankzij de Hydrolock[®] technologie.

Hoge structurele integriteit

- Vereenvoudigt verwijdering van het verband in één geheel

Uitstekende retentiecapaciteit:

- Vermindert het risico op lekkage en maceratie

Doeltreffend beheer van exsudaat, bloed en bacteriën:

- Vermindert het aantal verbandwissels
- Absorbeert en houdt exsudaat vast, zelfs onder compressie

In combinatie met een secundair verband met Safetac[®] technologie :

- Een unieke behandelingsoptie voor sterk exsuderende wonden

De Hydrolock[®] technologie biedt: • een uitstekende structurele integriteit dankzij de verstrengelde PVA vezels. Dat zorgt ervoor dat het verband in één keer kan worden verwijderd wat mogelijk tijd bespaart voor de verplegers. • een uitstekende retentiecapaciteit doordat de PVA vezels exsudaat insluiten

Voorzorgsmaatregelen

• Alle wonden moeten regelmatig worden gecontroleerd. • Bij tekenen van klinische infectie, raadpleeg een zorgverlener voor de behandeling van de infectie. • Exufiber[®] is niet geschikt voor droge wonden of ernstige brandwonden. • Als het verband uitdroogt en moeilijk te verwijderen is, bevochtig het dan volgens lokale richtlijnen (bv. met een steriele zoutoplossing of met steriel water) en laat het weken totdat het eenvoudig te verwijderen is. Het kan enkele minuten duren vooraleer Exufiber[®] een gel vormt. • Verwijder het verband voorzichtig door reiniging/spoeling

Indicaties

Voor alle sterk exsuderende chronische wonden of caviteiten zoals: • Doorligwonden • Diabetische voetulcera • Beenulcera (veneus, arterieel, gemengd) • Pilonidale cysten • Donorsites

Frequentie van verbandwissel

In geval van een ondiepe, diepe of cavitaire wond : Vervang Exufiber[®] bij saturatie. Exufiber[®] kan tot 7 dagen ter plaatse blijven afhankelijk van de wondconditie of volgens advies van de zorgverlener. In geval van donorsites : Vervang Exufiber[®] bij saturatie. Exufiber[®] kan tot 14 dagen ter plaatse blijven afhankelijk van de wondconditie of volgens advies van de zorgverlener.

Extra Informatie

Voor meer informatie: [klik hier](#)