



Artikelnummer	020782
Prijs excl. BTW	€ 48,35
Prijs incl. BTW	€ 58,50
Voorraad	Nog slechts 8 op voorraad

Omschrijving

Fixomull transparent is geschikt voor de fixatie van verbanden en kompressen, en voor fixatie van tubes, katheters en slangen. Fixomull transparant is een transparante en betrouwbare fixatie van verbanden. De wondfolie op rol is gemakkelijk op elke maat te knippen.

Eigenschappen en functies van Fixomull transparant wondverband

Fixomull transparent is een waterdichte folie op rol. Hierdoor kan de patiënt, na fixeren van een wondverband, zonder verdere bescherming onder de douche en/of in bad. De wondfolie beschermt de wondomgeving tegen vuil, vocht en bacteriën van buitenaf. De unieke patroontechnologie zorgt voor een zeer hoge lucht- en waterdampdoorlaatbaarheid. Doordat de huid de ruimte krijgt om te ademen wordt verweking van de huid tegengegaan. In combinatie met de huidvriendelijke kleefmassa geeft dit Fixomull transparent een bijzonder huidvriendelijk karakter. Fixomull transparent is extra dun en flexibel en past zich aan de vormen van het lichaam aan,

waardoor wrijving wordt voorkomen. Fixomull transparent hoeft niet verwijderd te worden voor radiologisch onderzoek.

Toepassingen van Fixomull transparant wondverband

- Fixatie van geavanceerde wondverbanden, kompressen, gazen, etc.
- Betrouwbare fixatie van sondes, tubes, katheters, etc.

Eenvoudig aanbrengen en verwijderen

- Knip Fixomull transparent af op de gewenste maat. Tip: werk bij een groot oppervlak met meerdere smalle stroken in plaats van één groot stuk.
- Het schutblad heeft twee helften. Verwijder eerst de helft zonder de rode rand.
- Plaats de folie over het wondverband en wrijf deze goed aan, vooral bij de randen en hoeken. Warmte laat de folie beter plakken.
- Verwijder de andere helft van het schutblad door deze terug te vouwen en evenwijdig aan de huid af te rollen. Wrijf de folie ook hier goed aan, vooral op de randen en hoeken. Dit deel van het schutblad blijft vastzitten aan de rode rand...
- ...verwijder het schutblad samen met de bovenste bescherm laag voorzichtig vanaf de zijde met de rode rand evenwijdig aan de huid.
- Wrijf de folie voor de laatste keer overal goed aan.

Verwijderen: Maak voorzichtig een hoekje los. Door de folie hierna evenwijdig aan de huid, in de groeirichting van haren, uit te rekken is de folie pijnloos te verwijderen. Ondersteun het vastzittende deel van de folie om trekkracht op de huid (en blaarvorming) te voorkomen.