



Artikelnummer	000456
Prijs excl. BTW	€ 14,05
Prijs incl. BTW	€ 17,00
Voorraad	op voorraad

Omschrijving

Inadine niet-verklevend wondverband 9,5 x 9,5cm (10 stuks)

WAT IS HET?

INADINE™ PVP-I niet-verklevend verband bestaat uit een nauwelijks verklevend materiaal van gebreide viscose, geïmpregneerd met een polyethyleenglycolbasis (PEG) die 10% povidonjodium bevat, overeenkomend met 1,0% jodium.

GEBRUIKSINDICATIES

INADINE™ is geïndiceerd voor de behandeling van ulceratieve wonden en kan ook worden gebruikt voor infectiepreventie bij:

- Minder ernstige brandwonden
- Minder ernstige traumatische schaafwonden

Op basis van klinisch onderzoek is gebleken dat INADINE™ ook geschikt kan zijn voor de behandeling van chronische wonden, waaronder:

- Ulcera op het been met verschillende oorzaken
- Diabetische ulcera op de voet
- Drukulcera

GEBRUIKSRICHTLIJNEN

VÓÓR AANBRENGEN Raadpleeg de gebruiksinstructies. Kies een maat INADINE™ die iets groter is dan de wond. Bereid de wond voor volgens het desbetreffende wondbehandelingsprotocol. Zorg dat de huid rond de wond droog is. Neem het verband uit de doos. Verband voorbereiden 1. Indien nodig kan INADINE™ op maat worden geknipt met een schone schaar of worden gevouwen. 2. Dit gaat het makkelijkst als één of beide afdekpapiertjes van INADINE nog niet zijn verwijderd. Verband aanbrengen 1. Verwijder een van de afdekpapiertjes. 2. Neem het verband van het andere afdekpapiertje en plaats INADINE™ direct op de wond. Secundair verband aanbrengen 1. Bedek INADINE™ met een secundair verband, bijvoorbeeld [GENTLE BORDER™](#). Kies het secundaire verband op basis van de hoeveelheid exsudaat. Tot slot kunt u een extra afdekking of retentie-/compressieverband aanbrengen. Verband vervangen of verwijderen 1. Als de kleur van het INADINE™-verband vervaagt, is de antiseptische werkzaamheid afgenomen en moet het verband worden vervangen. Aan het begin van de behandeling of in geval van ernstig geïnfecteerde of sterk exsuderende wonden kan het tot tweemaal daags worden vervangen. 2. Verwijder het secundaire verband voorzichtig. 3. Het verwijderen van INADINE™ kan eenvoudiger worden gemaakt door voorzichtig aan twee diagonaal tegenover elkaar liggend.

KENMERKEN:

- Betrouwbaar: INADINE™ is een betrouwbaar, efficiënt en niet-klevend verband ter behandeling van bacteriële besmetting en preventie van infecties van zowel chronische als acute wonden.
- Efficiënt: Povidonjodium heeft een brede antimicrobiële werking^{1,2} en is effectief gebleken tegen MRSA³.
- Niet-Klevend: INADINE™ beperkt verkleven aan de wond tot een minimum en vermindert daardoor het risico op schade aan het granulatieweefsel bij het verwijderen van het verband. In de klinische praktijk blijkt het verband te leiden tot minder pijn bij patiënten.